

XL-PRODUKTE

MOBILEX AUSWAHL AN XL-PRODUKTEN

INHALTSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

BUFFALO HD ROLLATOR.....	S. 3
LION ROLLATOR.....	S. 3
GEPARD ROLLATOR.....	S. 3
TIGER OUTDOOR ROLLATOR.....	S. 4
DOLPHIN LEICHTGEWICHTSROLLSTUHL.....	S. 4
DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL KAKADU.....	S. 4
AQUA BADESTUHL.....	S. 5
BADEWANNENBRETT.....	S. 5
TOILETTENSITZAUFLAGE.....	S. 5
ABNEHMBARE TOILETTENSITZERHÖHUNG.....	S. 5
GLEITLAKEN.....	S. 6
ENDLOS GLEITMATTE.....	S. 6
GLEITMATTE MIT ZUGSCHLAUFEN.....	S. 6
EINWEG GLEITKISSEN.....	S. 6
MOBIGLIDE TRANSFERBRETT.....	S. 7
KOHLEFASER RAMPE CB.....	S. 7
BUFFALO HEAVY DUTY RAD.....	S. 7
UNIVERSAL THERAPIETISCH.....	S. 7

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

XL-Produkte von Mobilex A/S - Darf es etwas mehr sein?

Mit einigen Kilos oder Zentimetern mehr als der Durchschnitt wird es bei der Kleiderwahl oft schon schwierig, das passende Kleidungsstück zu finden, vor allem dann, wenn es dazu auch noch modisch und schick sein soll. Genauso ergeht es den Menschen auch im Hilfsmittelsektor. Aus diesem Grund haben wir von Mobilex A/S uns dazu entschieden, Produkte genau für diese Zielgruppe der XL-Personen qualitativ hochwertig als moderne Hilfsmittel anzubieten, die den sehr hohen Ansprüchen dieser Zielgruppe entsprechen. So finden Sie als großer Mensch Rollatoren bis zu einer Körpergröße von 2,10 m oder einem Körpergewicht von bis zu 200 kg. Diese haben dann in der Regel auch die passende Sitzbreite bis zu 56 cm, um die Relationen untereinander harmonisieren zu lassen. Die Auswahl an beispielsweise Mobilex XL-Rollatoren ist sehr groß und diese dürfen durchaus auch leicht sein. Der Leichteste in dieser Gruppe, unser Gepard HD, wiegt tatsächlich nur 5,7 kg, wahrlich ein Fliegengewicht für diesen komplexen Anspruch.

Machbare Gewichtsbelastungen von 200 kg bis maximal 250 kg ziehen sich so durch das Mobilex-Sortiment mit einer guten Auswahl an unterschiedlichen Hilfsmitteln.

BUFFALO HD

Der Mobilex Rollator **Buffalo HD** hat einen grauen Aluminiumrahmen der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfalten lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt, um eine höhere Last zu tragen. Die maximale Tragfähigkeit erreicht daher 200 kg. Er hat große, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist die Grundlagen für einen bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmäßig verfügt der Rollator Buffalo über eine Transportsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt sowie über einen Stockhalter. Darüber hinaus ist eine große Auswahl an Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **200 kg** getestet und zugelassen.



Sitzbreite
56 cm

LION

Der Mobilex **Lion** Rollator ist ein für abseits asphaltierter und gepflasterter Wege entwickelter Rollator, der mit seinen großen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden. Die großen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege. Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfalten und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen. Er verfügt serienmäßig über eine reißfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt. Der Rollator ist in zwei Farben (braun oder anthrazitgrau) lieferbar und für ein Benutzergewicht von **200 kg** getestet und zugelassen.



Sitzbreite
56 cm

Für Personen
bis zu
2,10 m

Aus
Carbon

GEPARD

Der Mobilex Rollator **Gepard** hat einen Rahmen aus Kohlefaser mit weiteren Teilen aus Aluminium. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Die Ausstattung entspricht dem Rollator Leopard. Der Rollator Gepard (in allen Farben erhältlich) ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** bzw. die Version HD (nur in schwarz erhältlich) ist für ein Benutzergewicht bis **200 kg** getestet und zugelassen. Beide Versionen sind optional auch mit Softrädern lieferbar.



Belastbarkeit
HD Modell
200 kg

Belastbarkeit
Standard Modell
150 kg





TIGER OUTDOOR

Die Mobilex Arthritis Rollator **Tiger Outdoor** basiert auf dem eleganten Lion Rollator und verfügt daher auch über die selben Eigenschaften und Funktionen. Zusätzlich sind die weichen und bequemen Unterarmstützen mit ihren Bremsgriffen in Tiefe, Winkel und Höhe einstellbar. Außer beim Modell 312201 und 312211 sind die Armauflagen zusätzlich nach innen in 2 Stufen um jeweils 22,5 Grad drehbar. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat große, leicht laufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche. Das Modell Tiger Outdoor ist auch für den Aussenbereich und ein Benutzergewicht von **200 kg** zugelassen.

DOLPHIN

Der Mobilex **Dolphin** Leichtgewichtsrollstuhl hat einen Rahmen aus silberfarbenem Aluminium. Die Sitztiefe kann am Rollstuhl eingestellt werden (von 42 cm bis 48 cm). Die 24" Hinterräder sind mit Steckachsen aus ge rüstet, der Radstand und die Sitzhöhe sind auch einstellbar. An der Radaufnahme für die Hinter räder ist ein wei teres nach hinten versetztes Loch zur Verstellung der Radachsen bei Nutzung des Rollstuhles durch beinamputierte Personen angebracht. Auch die Vorderradgabeln sind mit Steckachsen befestigt. Die hochklappbaren Armlehnen sind einfach mittels eines Knopfverschlusses und ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar. Auch die Schiebegriffe lassen sich in der Höhe einstellen. Die Fußstützen sind höhenverstellbar. Winkelverstellbare Fußstützen sind optional lieferbar. Kippsicherung/Transferräder können als Zubehör geliefert werden. Der Rollstuhl ist in verschiedenen Größen lieferbar und ist serienmäßig mit pannensicherer Bereifung ausgestattet. Ein Standard Sitzkissen, das in der Tiefe an den Sitz angepasst werden kann, gehört ebenso zum Lieferumfang. Die Modelle mit einer Sitzbreite von 54 cm und 57 cm haben eine Tragfähigkeit von bis zu **200 kg**.



KAKADU

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl **Kakadu** hat einen Rahmen aus weiß eloxiertem Aluminium und wird standardmäßig mit vier 5" Rädern mit Feststellbremsen ausgeliefert. Der Sitz, der Rücken und die klappbaren Armlehnen bestehen aus schwarzem weichem PUR. Die Fußstützen sind höhenverstellbar und abnehmbar. Der Stuhl wird serienmäßig mit WC-Eimer, -Deckel und schwarzer Sitz-Abdeckung geliefert. Optional kann der Dusch- und Toilettenrollstuhl mit 24" Antriebsrädern und Feststellbremsen ausgestattet werden. Die Montage des 24" Räder Sets ist bereits werksseitig vorgesehen und daher sehr einfach zu bewerkstelligen. Das optionale Montage Set enthält alle dafür benötigten Teile. Das XL-Modell hat eine Sitzbreite von 55 cm und eine Tragkraft von bis zu **200 kg**.





AQUA BADESTUHL

Duschhocker aus Aluminium mit weichem Sitz aus grauem PUR, Sitzhöhe einstellbar. Lieferbar auch in Alu weiß, mit grauem weichen PUR Sitz. Für den Duschhocker ist als Zubehör eine Rückenlehne mit weicher grauer Lehne lieferbar. Die Lehne wird mittels Clips am Hocker befestigt. Lieferbar in den Rahmen-Farben weiß oder grau. Das breite Modell hat eine Tragkraft von **200 kg** und das neue XL-Modell von **250 kg**.

BADEWANNEN- BRETT

Die Badewannenbretter bestehen aus recycelbarem weißen Kunststoff. Sie ermöglichen dem Anwender, bequem auf der Badewanne zu sitzen. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung. Die Badewannenbretter sind leicht zu montieren. Die einfach einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen stützen das Brett an der Innenseite der Badewanne optimal ab. Der serienmäßig gelieferte Handgriff ist gut zu greifen und erhöht die Sicherheit. Die maximale Tragkraft beträgt **200 kg**.



TOILETTENSITZ- AUFLAGE


Die Auflage wird auf den normalen Toilettensitz gelegt. Kann einfach mit warmen Wasser und/oder neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Der Sitz besteht aus weichem Polyurethan.

Maße (LxB): 43.5 x 37.5 cm mit Öffnung 27.5 x 22 cm
Dicke: 4 cm
Tragkraft: **190 kg**

ABNEHMBARE TOILETTENSITZ- ERHÖHUNG

Die ergonomische geformte Toilettensitzerhöhung ist mit und ohne Deckel in Höhen von 5, 10 oder 15 cm lieferbar. Die Toilettensitzöffnung ist 220 mm breit und 270 mm tief mit großem Hygieneausschnitt. Die maximale Belastbarkeit beträgt **190 kg**. Da keine Kanten vorhanden sind, an denen sich Schmutz ansammeln kann, ist die Sitzerhöhung sehr pflegeleicht. Der Aufsatz ist wasserdicht und kann bei 85°C sterilisiert werden.



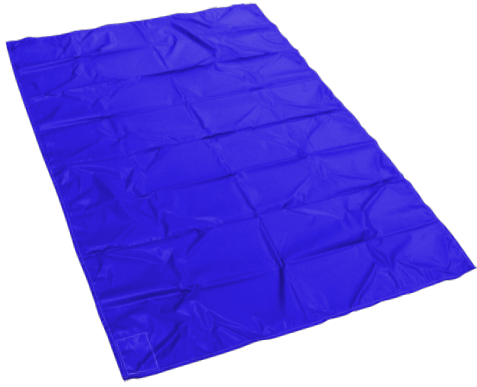

GLEITLAKEN

Die flachen Mobiglide Gleitlaken reduzieren die Reibungskräfte beim Umlagern oder Bewegen von Personen im Bett. Das Gleitlaken ist paarweise an zu wenden.

Größe: 150 x 100 cm oder 200 x 100 cm
Belastbarkeit: **250 kg**

ENDLOS GLEITMATTE

Die Mobiglide Endlos Gleitmatten bieten innen und außen einen äußerst geringen Reibungswiderstand und minimieren dadurch die Reibung bei der Umlagerung von Patienten. Die Endlos Gleitmatten sind in 3 Größen verfügbar.

Material: Nylon
Belastbarkeit: **250 kg**



GLEITMATTE MIT ZUGSCHLAUFEN

Die Mobiglide Gleitmatte mit Zugschlaufen für den bariatrischen Einsatz erleichtert das Positionieren im Sitzen oder Liegen bzw. das Umlagern von liegenden Patienten, z.B. vom Bett zu einer Trageliege. Eine paarweise Anwendung erleichtert u.a. auch das Positionieren von LifterTragegurten unter dem Patienten.

Größe: 100 x 200 cm
Belastbarkeit: **250 kg**
Material: Nylon

EINWEG GLEITKISSEN

Das Mobiglide Einweg Gleitkissen ist ein Endlosschlauch der z.B. als Rollstuhlauflege verwendet wird. Die interne Velouroberfläche kann nur in eine Richtung rutschen und verhindert dadurch dass der Benutzer ungewollt nach vorne rutscht. Das Gleitkissen erleichtert außerdem den Benutzer wieder in seine ursprüngliche Sitzposition zu bringen.

Größe: 45 x 50 cm
Belastbarkeit: **250 kg**




MOBIGLIDE TRANSFERBRETT

Das Mobiglide Patienten Transferbrett aus bruchfestem 6 mm dicken HDPE hat eine hohe Gleitfähigkeit auf der Oberseite und hilft bei der Patientenumlagerung von Bett zu Bett. In Krankenhäusern oder Pflegeheimen kann es auch in der Onkologie beim Röntgen verwendet werden da das Material Röntgen Strahlen durchlässt. Als Zubehör sind Antirutschstreifen lieferbar, die an der Unterseite des Brettes angebracht werden können um ein Weggleiten zu verhindern. Das Mobiglide Transferbrett hat eine Größe von 1500 x 700 mm. Die Belastbarkeit beträgt **200 kg** bei max. 20 cm Zwischenabstand und einer max. Höhendifferenz von 10 cm.



KOHLEFASER RAMPE CB

Bei mobilen Rollstuhlrampen spielt das Gewicht und die Handlichkeit eine sehr große Rolle. Diese Rampe aus Kohlefaser (Carbonfiber) ist äußerst stabil und mindert das Gewicht um 30% im Verhältnis zu einer gleichgroßen Aluminiumrampe. Darüber hinaus ist die Rampe für eine maximale Belastung von **350 kg** ausgelegt. Für eine äußerst leichte und agile Rollstuhlrampe gibt es keine bessere Wahl.

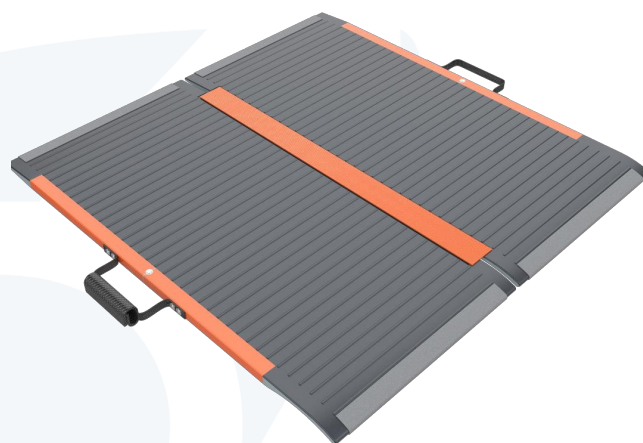

BUFFALO HEAVY DUTY RAD

Buffalo Heavy Duty Antriebsrad mit verstärkter Nabe, 2,6 mm Speichen, verstärkter Alu-Felge mit integriertem Greifring. 1 3/8" Decke mit Flexel Einlage. Nur in 24" lieferbar.

Nabenbreite: 53 mm / Kugellager: 12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit: **140 kg** pro Rad

UNIVERSAL THERAPIETISCH


Hergestellt aus thermogeformtem transparenten und bruchsicheren 4 mm dicken PETG. Der Tisch lässt sich an den Armlehnen festklemmen bei Rollstühlen mit einer Sitzbreite von 50-59 cm. Durch den in der Klemmhöhe verstellbaren Adapter passen die Mobilex Therapietische an alle geraden Armlehnen mit Polsterungshöhen von 28 bis 58 mm. Für dünnere Armlehnen sind Adapter verfügbar.





MODERNE HILFSMITTEL ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

Wir bieten eine große Auswahl an Hilfsmitteln und Ersatzteilen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen an. Alle unsere Mobilex-Produkte sind von bester Qualität und erfüllen die besonderen Bedürfnisse der Benutzer.

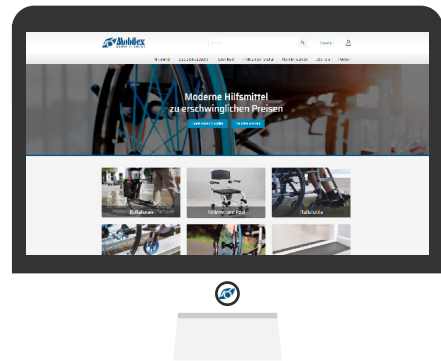

Besuchen Sie uns auf www.mobilex.dk



Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg