

# KAKADU

CARROZZINA COMODA DA DOCCIA



# INDICE

INDICE E DESCRIZIONE GENERALE .....	2
CARROZZINA COMODA DA DOCCIA KAKADU .....	3
FUNZION E DATI TECNICI .....	4
ACCESSORI	
24" Ruote da 24", antitip, cintua di supporto, schienale tensionabile .....	5
Diverse sedute, scivolo per l'urina, poggiatesta .....	6
Cuscini morbidi, barra di sicurezza, supporto amputati, pelotte, ruote 5" .....	7
CARROZZINA COMODA BASCULANTE KAKADU TILT .....	8

## DESCRIZIONE GENERALE

Le carrozzine comode da doccia Mobilex Kakadu sono realizzate con materiali di alta qualità e offrono all'utente un alto livello di comfort e sono di facile uso anche per il personale infermieristico.

Le carrozzine comode Mobilex Kakadu sono regolabili in altezza e si assemblano in modo semplice e veloce. Nello sviluppo delle nostre carrozzine comode ci siamo impegnati particolarmente a rendere tutti i modelli facilmente adattabili alle esigenze degli utenti per non dover ricorrere a costose soluzioni individuali.

Anche per questo Mobilex offre una vasta gamma di accessori che consente di soddisfare la maggior parte delle esigenze garantendo un'alto grado di comfort al singolo utente.

Il telaio delle carrozzine comode Kakadu è realizzato in alluminio di alta qualità verniciato a polvere. Le viti e le altre parti in acciaio sono tutte realizzate in acciaio inossidabile, garantendo una lunga durata senza bisogno di una intensiva manutenzione. La seduta, lo schienale ed i braccioli sono realizzati in resistente schiuma poliuretana nera dal design moderno e confortevole per l'utente. Le quattro ruote da 5" sono tutte stazionabili e sono dotate di una protezione efficace per impedire a capelli o sporcizia di infiltrarsi nella ruota.

Le carrozzine comode da doccia Mobilex Kakadu sono costruite in modo da rendere agevole l'igienizzazione quotidiana e possono essere inserite nelle cabine di lavaggio igienizzanti presenti nelle strutture.

# KAKADU

## CARROZZINA COMODA DA DOCCIA



**1** Schienale morbido in schiuma di PU. Schienale tensionabile come accessorio.

**2** Braccioli elevabili con appoggi imbottiti in schiuma poliuretanic morbida.

**3** Seduta con incavo per l'igiene. Altri tipi di sedute morbide fornibili come accessorio.

**4** Poggiagambe ripiegabili lateralmente.

**5** Poggiapiedi ribaltabili e regolabili in altezza ed inclinazione.

**6** Ruote da 5" (125 mm) stazionabili, adatte alla regolazione in altezza della seduta.

# FUNZIONE E DATI TECNICI



Le ruote da 5" (125 mm) sono facili da montare. Tutte e 4 le ruote sono stazionabili e dotate di paraspruzzi.



I poggiapiedi facili da montare sono ripiegabili lateralmente



Il secchio del WC può essere facilmente rimosso anche con l'utente seduto in carrozzina.



La seduta ed il coperchio sono realizzati in schiuma di PU nera e garantiscono una seduta confortevole.

Differenze per la **versione tender 3020U8**: Questa versione esiste solo nella versione standard e con seduta da 45 cm. È stata progettata e costruita in base a richieste ed esigenze degli ospedali e istituti danesi ed offre alcune particolarità che la differenziano dalle altre versioni. Le 4 ruote, anche qui tutte con freni stazionabili, su questo modello sono da 4" (100 mm) offrendo una maggiore regolazione d'altezza della seduta, da 48,5 a 56,5 cm. Su questo modello tutte le regolazioni sono eseguibili senza l'uso di attrezzi.

Dati tecnici	Tender 3020U8	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Diff. con 24"
Larghezza seduta	45 cm	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Profondità seduta	43 cm	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Altezza seduta	48,5 - 56,5 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Apertura seduta	21,3 x 40,5	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Alt. max. superabile **	41 - 49 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Largh. max. sup.	40 cm	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	35 cm	40 cm	---
Larghezza totale *	56 cm	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 8 cm *
Profondità totale	93 cm	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 15 cm
Altezza totale	96-104 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Portata massima	150 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	150 Kg	150 Kg	---
Peso	12,15 Kg	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Basculamento	---	---	---	---	---	-5° a +25°	-5° a +25°	---

\* Larghezza totale per Kakadu Tilt (302024 o 302025): + 14 cm

\*\* Le ruote con tubo allungato (accessorio - cod. 30212M) consentono di aumentare l'altezza superabile di 5 cm.

\* Le ruote con prolunga (accessorio, codice 30212M) aumentano l'altezza superabile di +5 cm.

# ACCESSORI

Le carrozzine comode da doccia Mobilex possono essere dotate di **ruote posteriori grandi** in modo che l'utente possa muoversi da solo. Le ruote posteriori da 24" sono fornite complete freni di stazionamento, di corrimano e con copertoni pieni. **codice 302017**



Il corrimano ha la parte interna anatomica in modo da fornire una buona presa anche a mani bagnate. Il kit ruote da 24" contiene anche i freni e tutte le parti necessarie per il montaggio. In fase di montaggio si prega di tener presente che le ruote da 24" aumentano la larghezza totale di 8 cm.

Quando si utilizzano le ruote posteriori da 24" può essere vantaggioso montare un **antiribaltamento** (antitip) specialmente sul modello "Tilt". L'antiribaltamento (vedi foto sotto) può essere montato facilmente e senza attrezzi. **codice 302125**



La **cintura di sicurezza** non ha parti metalliche che possono arrugginire ed è quindi particolarmente adatta per ambienti umidi. La cintura può essere utilizzata anche come cintura di **supporto aggiuntivo** per la zona lombare. **codice 302122**



Per fornire all'utente un supporto ottimale della schiena può essere adottato uno **schienale tensionabile** che può essere adattato in modo ottimale alla schiena dell'utente tramite 3 cinghie regolabili. La superficie perforata non assorbe acqua permettendo così alla pelle di respirare. **codice 302164**



# ACCESSORI

La **seduta in poliuretano** è dotata di serie di un incavo per l'igiene, i bordi del quale sono inclinati in modo che il coperchio vi si blocchi saldamente. La seduta è fissata con clip e può essere facilmente rimossa senza attrezzi.

**codice 302103 (seduta)**  
**codice 302107 (coperchio)**



Come opzione è disponibile una **seduta con foro ovale** e bordo anteriore chiuso. La seduta si fissa con clip e può essere facilmente rimossa senza attrezzi.

**codice 302109**

È disponibile anche un **coperchio chiuso** che copre l'intera superficie della seduta, sia per la seduta standard che per quella con foro ovale. Il coperchio è sagomato nella parte inferiore in modo che si inserisca nel foro della seduta e non possa scivolare.

**codice 302110**



Se il flusso urinale non centra il secchio, è possibile fissare all'incavo della seduta uno scivolo per l'urina che funge anche come distanziatore delle gambe. Si monta facilmente senza attrezzi ed essendo fatto in poliuretano morbido risulta facile da pulire.

**codice 30214U**

Per tutte le sedie comode da doccia Mobilex è disponibile un **poggiatesta** che può essere facilmente fissato al telaio. È regolabile sia in altezza che in profondità. Il poggiatesta stesso è realizzato in morbida e confortevole schiuma poliuretana e può essere facilmente adattato alla forma della testa dell'utente.


**codice D2101**



# ACCESSORI

Le carrozzine comode Mobilex sono dotate di una seduta in poliuretano che offre un buon comfort per la maggior parte degli utenti. Se ciò non bastasse per offrire una maggiore riduzione della pressione è disponibile un ulteriore **cuscino in schiuma morbida** rivestito con una fodera Decutex. Tutte le cuciture sono completamente saldate ed impermeabili al 100%. I cuscini sono molto facili da pulire e sono disponibili sia per la seduta aperta che per quella chiusa davanti.

**codice 30210U (aperto davanti)**  
**codice 30211U (chiuso davanti)**

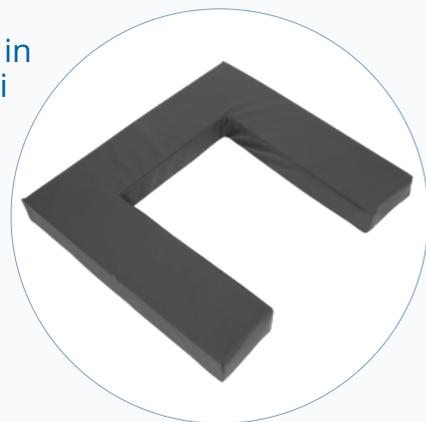

Per garantire una maggiore sicurezza all'utente, è possibile fissare una **barra di sicurezza** alla carrozzine comode da doccia Mobilex. La barra di sicurezza è fissata ai braccioli della carrozzina con due supporti ai quali la barra è bloccata tramite due pulsanti in ottone. Premendo nuovamente i due pulsanti la barra può essere tolta semplicemente tirandola verso l'alto.

**codice 302127**

Il **supporto per amputati** sostiene il moncone della gamba nella posizione corretta e può essere montato senza attrezzi al posto del normale poggiapiedi. Il supporto è dotato di 2 gusci in poliuretano stampato angolabili in modo indipendente per un supporto ottimale.

**codice 302128 (sx)**  
**codice 302129 (dx)**



La **pelotta laterale** in poliuretano si fissa al telaio dello schienale ed è regolabile in base alle esigenze dell'utente. È disponibile in 2 misure: small (10 x 14 cm) o large (14 x 20 cm).

**codice 30212P (small)**  
**codice 30212Q (large)**

Per la carrozzine comode da doccia Mobilex sono disponibili **ruote da 5" con tubo prolungato**. In questo modo è possibile aumentare di 5 cm l'altezza della seduta e di conseguenza anche l'altezza superabile dalla carrozzina.

**codice 30212M**



# KAKADU TILT

## BASCULANTE



La carrozzina basculante **Kakadu Tilt** ha un angolo di basculamento regolabile da  $-5^{\circ}$  a  $+25^{\circ}$ . È dotata di serie di poggiatesta regolabile in altezza, profondità ed inclinazione. I braccioli sono ribaltabili. I poggiambraccioli sono ribaltabili lateralmente ed hanno poggipiedi ad inclinazione variabile e regolabili in altezza. La seduta è provvista di un'apertura per l'utilizzo del secchio WC montato sotto la seduta stessa. Il secchio è estraibile ed è dotato di coperchio. Le imbottiture della seduta, dei braccioli e dello schienale sono in poliuretano morbido. La carrozzina è dotata di 4 ruote frenate da 5" ed è predisposta al montaggio di 2 ruote posteriori da 24". Il kit da 24" viene fornito completo di freni e di tutte le parti necessarie al montaggio.

Dati tecnici	Tilt 302024	Tilt L 302025	Differenze con ruote da 24"
Larghezza seduta	45 cm	50 cm	---
Profondità seduta	43 cm	43 cm	---
Altezza seduta	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Foro seduta	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Altezza superabile *	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Larghezza superabile	35 cm	40 cm	---
Larghezza totale	56 cm	61 cm	+ 14 cm
Profondità totale	110-120 cm	110-120 cm	+ 15 cm
Altezza totale	97-141 cm	97-141 cm	---
Portata	150 Kg	150 Kg	---
Peso a vuoto	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Basculamento	da $-5^{\circ}$ a $+25^{\circ}$	da $-5^{\circ}$ a $+25^{\circ}$	---

\* Le ruote con prolunga (accessorio, codice 30212M) aumentano l'altezza superabile di +5 cm.

