

KAKADU

SILLA DE DUCHA



INDICE

INDICE Y DESCRIPCIÓN GENERAL	2
SILLA DE DUCHA KAKADU	3
FUNCIONES Y DATOS TÉCNICOS	4
ACCESORIOS	
Ruedas de 24", antivuelco, cinturón de sujeción, respaldo tensable	5
Varios asientos, conducto de orina, reposacabezas	6
Cojines blandos, barra de seguridad, soporte para amputados, pelotte, ruedas de 5"	7
SILLA DE DUCHA KAKADU TILT	8

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las sillas de ducha Mobilex Kakadu están fabricadas con materiales de alta calidad y ofrecen al usuario un alto nivel de comodidad, además de ser fáciles de usar para el personal de asistencia.

Las sillas de ducha Mobilex Kakadu son regulables en altura y pueden montarse de forma rápida y sencilla. En el desarrollo de nuestras sillas de ducha, hemos hecho un esfuerzo especial para que todos los modelos sean fácilmente adaptables a las necesidades del usuario, para no tener que recurrir a costosas soluciones individuales.

Esta es una de las razones por las que Mobilex ofrece una amplia gama de accesorios para satisfacer la mayoría de las necesidades, garantizando al mismo tiempo un alto grado de comodidad para el usuario individual.

El marco de las sillas de ducha Kakadu está fabricado en aluminio con recubrimiento de polvo de alta calidad. Los tornillos y demás piezas de acero son todos de acero inoxidable, lo que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento intensivo. El asiento, el respaldo y los reposabrazos son de espuma de poliuretano negra duradera con un diseño moderno y fácil de usar. Las cuatro ruedas de 5" son giratorias con freno de estacionamiento y están equipadas con una eficaz protección para evitar que entre pelo o suciedad en la rueda.

Las sillas de ducha Mobilex Kakadu están fabricadas de tal forma que son fáciles de higienizar a diario y pueden colocarse en las cabinas higienizables de las instalaciones.

KAKADU

SILLA DE DUCHA



1

Respaldo de cómoda espuma de PU. Respaldo de velcro disponible como accesorio

2

Reposabrazos abatibles, tapizados con cómoda espuma de PU

3

Asiento con hueco íntimo. Otros modelos de asiento disponibles en suave espuma de PU

4

Reposapiernas laterales abatibles y regulables en altura

5

Reposapiés abatibles y regulables en ángulo

6

Ruedas de 125 mm (5") ajustables en altura

FUNCIÓN Y DATOS TÉCNICOS



Las ruedas de 125 mm (5") son fáciles de montar. Las 4 ruedas son estacionarias y están equipadas con protectores contra el barro



Los reposapiés, fáciles de montar, se pueden plegar hacia un lado



La cubeta del inodoro puede extraerse fácilmente incluso con el usuario sentado en una silla de ducha



El asiento y la tapa son de espuma de PU negra y proporcionan un cómodo asiento.

Diferencias para la versión danesa 3020U8: Esta versión sólo existe en la versión estándar y con un asiento de 45 cm. Se diseñó y construyó de acuerdo con los requisitos y necesidades de los hospitales e institutos daneses y ofrece algunas características especiales que la diferencian de las demás versiones. Las 4 ruedas de este modelo, también con frenos fijos, son de 4" (100 mm) y ofrecen un mayor ajuste de la altura del asiento, de 48,5 a 56,5 cm. En este modelo, todos los ajustes pueden realizarse sin necesidad de herramientas.

Datos técnicos	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Diff. por 24"
Ancho de asiento	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Profundidad asiento	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Altura asiento	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Apertura asiento	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Altura máx. superable **	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Ancho máx. superable	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	35 cm	40 cm	---
Ancho total *	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 8 cm *
Profundidad total	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 15 cm
Altura total	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Peso máx. usuario	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	150 Kg	150 Kg	---
Peso	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Basculación	---	---	---	---	-5° bis +25°	-5° bis +25°	---

* Ancho total Kakadu Tilt (302024 o 302025): + 14 cm

** Las ruedas con tubo alargado (accesorio - cod.. 30212M) permiten un ajuste adicional de la altura del asiento.

ACCESORIOS

Las sillas de ducha Mobilex pueden equiparse con grandes ruedas traseras para que el usuario pueda desplazarse por sí mismo. Las ruedas traseras de 24" están equipadas con freno de estacionamiento, aro de empuje y neumático macizo. **código 302017**



El aro de empuje tiene una parte interior anatómica que proporciona un buen agarre incluso con las manos mojadas. El juego de ruedas de 24" contiene también los frenos y todas las piezas necesarias para el montaje. Nota: Las ruedas de 24" aumentan la anchura total en 8 cm.

Al utilizar las ruedas traseras de 24" puede ser ventajoso instalar un antivuelco, especialmente en el modelo 'Tilt'. El antivuelco (véase la foto de abajo) puede montarse fácilmente y sin herramientas.

código 302125



El **cinturón** no tiene piezas metálicas que puedan oxidarse, por lo que es especialmente adecuado para entornos húmedos. El cinturón también puede utilizarse como cinturón de sujeción adicional para la región lumbar. **código 302122**



Para proporcionar al usuario un apoyo óptimo de la espalda, un **respaldo tensable** puede ajustarse de forma óptima a la espalda del usuario mediante 3 correas ajustables. La superficie perforada no absorbe el agua, permitiendo así que la piel respire. **código 302164**



ACCESORIOS

El **asiento de poliuretano** viene de serie con un encaje higiénico, cuyos bordes están inclinados para que la tapa quede bien encajada en él. El asiento se fija con clips y puede retirarse fácilmente sin herramientas.

código 302103 (asiento)
codice 302107 (tapa)



Hay disponible opcionalmente un **asiento con orificio** ovalado y borde delantero cerrado. El asiento se fija con clips y puede retirarse fácilmente sin herramientas.

código 302109

También hay disponible una **tapa cerrada** que cubre toda la superficie del asiento, tanto para el asiento estándar como para el asiento con orificio ovalado. La tapa tiene forma en la parte inferior para que encaje en el orificio del asiento y no pueda deslizarse.

código 302110



Si el flujo de orina no llega al cubo, se puede acoplar a la cavidad del asiento un **conducto para la orina**, que también actúa como separador de piernas. Se monta fácilmente sin herramientas y al ser de poliuretano blando es fácil de limpiar.

código 30214U

Todas las sillas de ducha Mobilex disponen de un **reposacabezas** que puede fijarse fácilmente a la estructura. Es ajustable tanto en altura como en profundidad. El propio reposacabezas está fabricado con espuma de poliuretano suave y cómoda, y puede ajustarse fácilmente a la forma de la cabeza del usuario.


código D2101



ACCESORIOS

Las sillas de duchas Mobilex están equipadas con un asiento de poliuretano que ofrece un buen confort a la mayoría de los usuarios. Si esto no es suficiente para ofrecer un mayor alivio de la presión, hay disponible un **cojín adicional de espuma suave** recubierto con un forro Decutex. Todas las costuras están totalmente soldadas y son 100% impermeables. Los cojines son muy fáciles de limpiar y están disponibles para asientos delanteros abiertos y cerrados.

*código 30210U (abierto delante)
código 30211U (cerrado delante)*

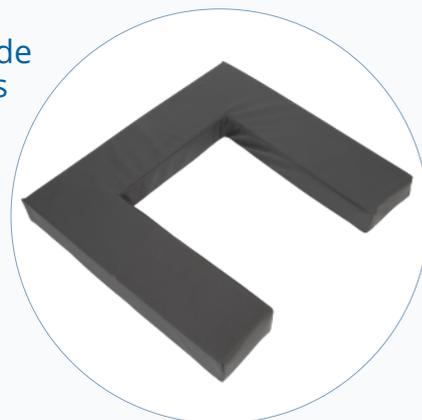

Para proporcionar seguridad adicional al usuario, se puede acoplar una **barra de seguridad** a la silla de ducha. La barra de seguridad se fija a los reposabrazos con dos soportes a los que se bloquea la barra mediante dos botones de latón. Pulsando de nuevo los dos botones, la barra puede retirarse simplemente tirando de ella hacia arriba.

código 302127

El **soporte para amputados** apoya el muñón de la pierna en la posición correcta y puede instalarse sin herramientas en lugar del reposapiés normal. El soporte tiene 2 conchas de poliuretano moldeado que pueden angularse independientemente para un apoyo óptimo.

*código 302128 (izq.)
código 302129 (der.)*



La **pelotta lateral** de poliuretano se fija al marco del respaldo y es ajustable según las necesidades del usuario. Está disponible en 2 tamaños: pequeño (10 x 14 cm) o grande (14 x 20 cm).

*código 30212P (small)
código 30212Q (large)*

Para las sillas de ducha Mobilex hay disponibles **ruedas de 5" con tubo prolongado**. Esto permite aumentar la altura del asiento en 5 cm y, en consecuencia, también la altura a la que puede subir la silla de ducha.

código 30212M



KAKADU TILT

BASCULANTE



La silla de ducha **Kakadu Tilt** tiene un ángulo de inclinación ajustable de -5° a $+25^{\circ}$. Viene de serie con un reposacabezas ajustable en altura, profundidad e inclinación. Los reposabrazos son abatibles. Los reposapiernas pueden inclinarse hacia un lado y disponen de reposapiés inclinables y regulables en altura. El asiento tiene una abertura para el uso de la cubeta del inodoro montada debajo del asiento. La cubeta es extraíble y tiene tapa. El acolchado del asiento, los reposabrazos y el respaldo es de poliuretano blando. La silla de ducha está equipada con 4 ruedas de 5" con freno y está preparada para montar 2 ruedas traseras de 24". El juego de 24" viene completo con frenos y todas las piezas necesarias para el montaje.

Datos técnicos	Tilt 302024	Tilt L 302025
Anchura del asiento	45 cm	50 cm
Profundidad del asiento	43 cm	43 cm
Altura del asiento	55 - 60 cm	55 - 60 cm
Agujero del asiento	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5
Altura libre *	40 - 45 cm	40 - 45 cm
Anchura libre	35 cm	40 cm
Anchura total	56 cm	61 cm
Profundidad total	110-120 cm	110-120 cm
Altura total	97-141 cm	97-141 cm
Capacidad de carga	150 Kg	150 Kg
Peso en vacío	15,10 kg	15,70 kg
Basculante	da -5° a $+25^{\circ}$	da -5° a $+25^{\circ}$

* Las ruedas con extensión (accesorio cód. 30212M) aumentan la altura superable en +5 cm

