

Mobilex PU-Monteringsapparat varenr. 211501

Brugervejledning



MOBILEX A/S
mobilex.dk
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Generel information

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet og vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vores produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Mobilex A/S
mobilex.dk
DK-8660 Skanderborg
Denmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk


2. Sikkerhedsinstrukser

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.

3. Produkt beskrivelse

PU-Monteringsapparat er udviklet som et hjælpeværktøj til montering af polyuretan dæk i størrelsen 20" til 28".

Apparatet medvirker til en nem og tidsbesparende påsætning af PU-baner.

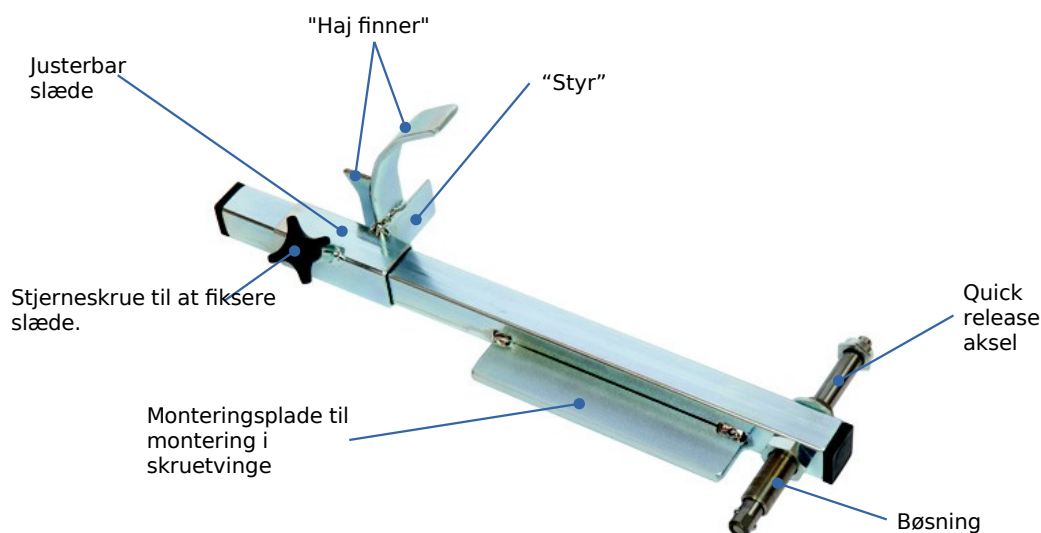

Samlevejledning

PU-Monteringsapparat 211501 kommer samlet.

Anvendelse



1. PU-Monteringsapparat fastspændes i skruetvinge. Hjulet sættes i quick release akslen.



2. Skub den justerbare slæde ind mod hjulet således at den vertikale "hajfinne" er ved hjulet, men hvor hjulet stadig kan drejes rundt. Spænd derefter den justerbare slæde fast med stjerneskruen.



3. Monter PU-banen så lang rundt på fælg som muligt. Vær opmærksom på at den vertikale "hajfinne" er mellem fælg og PU-bane.



4. Drej ved håndkraft hjulet rundt til udgangsposition. PU-banen er nu monteret.



5. Afmonter hjulet fra PU-Monteringsapparatet ved at løfte det op fra Quick release akslen og gør den fri af den vertikale "hajfinne". Bemærk at den vil være lidt stram at løfte af "hajfinnen".

4. Rengøring & vedligehold

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

- Lettere snavs og støv kan fjernes med en fugtig klud.
- Tungere former for snavs kan fjernes med et ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

Bør opbevares tørt og altid over 0 grader Celsius. Undgå store temperatur udsving.

5. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

6. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til

Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.