

# KAKADU

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL



# INHALTSVERZEICHNIS

|   |   |
|---|---|
| ALLGEMEINE BESCHREIBUNG.....              | 2 |
| KAKADU DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL..... | 3 |
| FUNKTION UND TECHNISCHE DATEN.....        | 4 |
| ZUBEHÖR.....                              | 5 |
| KAKADU TILT MIT KANTELUNG.....            | 8 |

## Allgemeine Beschreibung

Die Mobilex Dusch- und Toilettenrollstühle werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, bieten dem Benutzer hohen Komfort und sind auch für das Pflegepersonal einfach zu bedienen.

Die Dusch- und Toilettenrollstühle sind höhenverstellbar und können schnell und einfach montiert werden. Bei der Entwicklung unserer Dusch- und Toilettenrollstühlen haben wir uns darauf konzentriert, alle Modelle leicht anpassbar zu machen um sie bereits standardmässig für die meisten Nutzern verwenden zu können.

Eine breite Palette an Zubehör ermöglicht es, die meisten Anforderungen zu erfüllen und den Komfort des einzelnen Benutzers zu erhöhen. Der stabile Rahmen besteht aus hochwertigem weiß pulverlackiertem Aluminium. Schrauben und andere Stahlteile werden konsequent aus Edelstahl gefertigt, wodurch der Dusch- und Toilettenrollstuhl eine lange und wartungsfreie Lebensdauer hat. Der Sitz, die Rückenlehne und die Armlehnen bestehen aus strapazierfähigen schwarzem PU-Schaumstoff, der bequem für den Benutzer ist und ein zeitloses Design hat. Die vier feststellbaren 5" Räder sind mit einem wirksamen Schutz ausgestattet, der sicherstellt, dass sich keine Haare oder anderer Schmutz im Rad ansammeln können. Die Räder bestehen aus Kunststoff und Edelstahl und haben eine doppelt wirkende Bremse.

Die Mobilex Dusch- und Toilettenrollstühle erleichtern die tägliche Reinigung und können gemäß den neuesten Richtlinien maschinell gewaschen werden, z.B. in häuslicher Pflege in Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen.

### Weitere Informationen?

Auf diesen Seiten finden Sie eine Auswahl unserer umfangreichen Produktpalette. Wenn Sie sich für unser gesamtes Sortiment interessieren, laden wir Sie ein, unsere Website [www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk) zu besuchen, wo Sie alle Produkte ansehen und unseren Katalog herunterladen können. Der QR-Code führt Sie direkt zu unserer Website.



# KAKADU

## DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL




- ① Rücken aus angenehmen PU-Schaum (ein Velcrorücken ist als Zubehör lieferbar).
- ② Hochklappbare Armlehnen, gepolstert mit angenehmen PU-Schaum.
- ③ Sitz mit Intimaussparung. Weitere Sitzmodelle aus weichem PU-Schaum lieferbar.
- ④ Seitlich wegklapp- und höhenverstellbare Beinstützen.
- ⑤ Hochklappbare und winkelverstellbare Fußstützen.
- ⑥ Höhenverstellbare 5" (125 mm) Räder.

# FUNKTION UND TECHNISCHE DATEN



Die 5" (125 mm) Räder sind einfach zu montieren. Alle vier Räder sind feststellbar und mit Schmutzfänger ausgestattet.

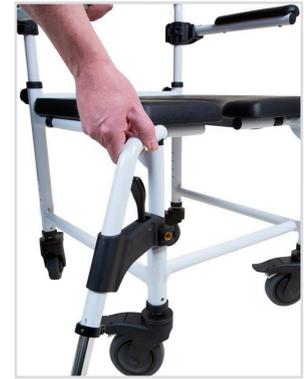

Die Beinstützen lassen sich ohne Werkzeug montieren und können seitlich weggeklappt werden, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern.



Der Toiletteneimer lässt sich einfach entfernen auch wenn der Nutzer im Stuhl sitzt.



Der Sitz und Deckel aus schwarzem PU-Schaumstoff ermöglichen ein bequemes Sitzen.

| Technische Daten  | Small<br>302015 | Standard<br>302018 | Large<br>302019 | XL<br>302020 | Diff.<br>bei 24" | XXL<br>302021 |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| Sitzbreite  | 38 cm           | 45 cm              | 50 cm           | 55 cm        | ---              | 61 cm         |
| Sitztiefe   | 38 cm           | 43 cm              | 43 cm           | 43 cm        | ---              | 51 cm         |
| Sitzhöhe  | 50 - 55 cm      | 50 - 55 cm         | 50 - 55 cm      | 50 - 55 cm   | ---              | 51-53 cm      |
| Sitz Ausschnitt   | 15,5 x 21 cm    | 19 x 26 cm         | 19 x 26 cm      | 19 x 26 cm   | ---              | 19 x 26 cm    |
| Überfahrbare Höhe **  | 42,5 - 47,5 cm  | 43 - 48 cm         | 42 - 47 cm      | 40 - 45 cm   | ---              | 41-43 cm      |
| Überfahrbare Breite   | 32 cm           | 40 cm              | 45 cm           | 50 cm        | ---              | 51 cm         |
| Sitz-/Rückenwinkel  | 90 °/ 12°       |                    |                 |              | ---              | 90 °/ 12°     |
| Abstand zwischen den Armlehnen  | 39,5 cm         | 46,5 cm            | 51,5 cm         | 56,6 cm      | ---              | 62,5 cm       |
| Höhe der Rückenlehne  | 46 cm           |                    |                 |              | ---              | 46 cm         |
| Gesamtbreite  | 49 cm           | 56 cm              | 61 cm           | 66 cm        | + 9,5 cm         | 72,5 cm       |
| Gesamttiefe   | 85 cm           | 93 cm              | 93 cm           | 93 cm        | + 19 cm          | 93 cm         |
| Gesamthöhe  | 96-101 cm       | 96-101 cm          | 96-101 cm       | 96-101 cm    | ---              | 99-101 cm     |
| Tragkraft   | 130 Kg          | 150 Kg             | 150 Kg          | 200 kg       | ---              | 270 kg        |
| Leergewicht   | 11,00 Kg        | 12,90 Kg           | 13,50 Kg        | 14,10 kg     | + 4,20 kg        | 19,75 kg      |
| ** Die Räder mit verlängertem Rohr (Zubehör - Art.Nr. 30212M) ermöglichen eine zusätzliche Bodenfreiheit von +5 cm. |                 |                    |                 |              |                  |               |

## Dusch- und Toilettenrollstühle

## HMV-Nummern

|  |               |
|--|---------------|
| Kakadu mit 5" Rädern (302015/18/19)                  | 18.46.01.2025 |
| Kakadu Tilt (mit Kantelung) (302024/25)              | 18.46.01.4005 |
| Kakadu mit 24" Antriebsrädern (302015-19)            | 18.46.01.0027 |
| Kakadu XL (302020)                                   | 18.46.01.3005 |
| Kakadu XL mit 24" Antriebsrädern (302020 mit 302017) | 18.46.01.1004 |

# ZUBEHÖR

## 24" Antriebsräder

Art.Nr. 302017

Der Mobilex Dusch- und Toilettenrollstuhl kann mit großen Antriebsrädern ausgestattet werden, damit der Benutzer sich selbst fortbewegen kann. Die 24" Antriebsräder werden mit Greifring und hochwertigen PU-Reifen geliefert.

Der Greifring ist an der Unterseite genoppt, um auch mit nassen Händen einen guten und festen Halt zu bieten. Der Radsatz enthält auch die Bremsen sowie alle zur Montage benötigten Teile.

Beachten Sie, dass die Gesamtbreite sich durch die 24" Räder um 9,5 cm erhöht.

### ACHTUNG!

*Es ist nicht möglich, 24" Antriebsräder an Kakadu XXL (Art.Nr. 302021) zu montieren, da der Stuhl dafür nicht zugelassen ist.*



## Kippschutz

Art.Nr. 302125

Bei Verwendung der 24" Antriebsräder ist insbesondere beim "Tilt" Modell ein Kippschutz empfehlenswert.



## Sicherheitsgurt

Art.Nr. 302122

Der Sicherheitsgurt hat keine Metallteile, die rosten können und ist daher besonders für Nassräume geeignet. Der Gurt kann auch als zusätzlicher Stützgurt für den Lendenbereich verwendet werden.



## Velcrorücken

Art.Nr. 302164

Um dem Benutzer eine optimale Rückenstütze zu bieten kann der flexible Velcrorücken mit seinen 3 individuell verstellbaren Riemen bestens an den Rücken des Benutzers angepasst werden. Die perforierte Oberfläche nimmt kein Wasser auf und lässt die Haut atmen.



# ZUBEHÖR

## PU-Sitz und Deckel

Art.Nr. 302103 (Deckel) / 302107 (Sitz)

Der Sitz aus PU-Schaum ist standardmäßig mit Hygieneausschnitt ausgestattet. Die Kanten des Ausschnittes sind geneigt, damit der Deckel darin fest sitzt. Der Sitz ist mit Clips befestigt und kann ohne Werkzeug leicht entfernt werden.

Der Ausschnitt misst 27 x 19 cm.




## PU-Sitz mit rundem Loch

Art.Nr. 302109

Optional ist ein PU-Sitz mit ovalem Ausschnitt und geschlossener Vorderkante erhältlich. Der Sitz wird mit Clips befestigt und kann ohne Werkzeug leicht entfernt werden.

Der Ausschnitt misst 27 x 19 cm.

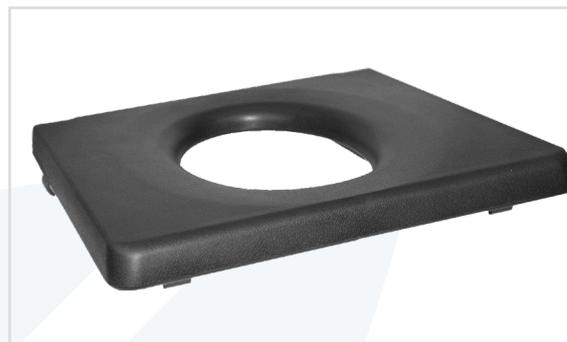

## Geschlossene PU-Sitzplatte

Art.Nr. 302110

Sowohl für den Standardsitz, als auch für den oval ausgeschnittenen Sitz, ist eine geschlossene PU-Sitzplatte erhältlich, die die gesamte Sitzfläche abdeckt. Die Sitzplatte ist so geformt, dass sie in den Sitz-Ausschnitt passt und daher auch bei Bewegungen nicht verrutschen kann.



## Urinfänger

Art.Nr. 30214U

Im Falle, dass der Urinfluß den Eimer nicht trifft, kann ein sog. Urinfänger ohne Werkzeug an der Vorderkante des Hygieneausschnitts angebracht werden. Der Urinfänger wirkt auch als Abstandhalter zwischen den Beinen. Das Produkt besteht aus weichem Polyurethan und ist leicht zu reinigen.



## Kopfstütze

Art.Nr. D2101

Für alle Mobilex Dusch- und Toilettenstühle ist eine Kopfstütze erhältlich, die einfach am Rahmen befestigt werden kann. Sie ist sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe verstellbar. Die Kopfstütze selbst besteht aus weichem, komfortablem Polyurethanschaum und lässt sich leicht an die Kopfform des Benutzers anpassen.




# ZUBEHÖR

## Weiche Sitzkissen

Art.Nr. 30210U (mit Ausschnitt) / 30211U (ohne Ausschnitt)

Die Dusch- und Toilettenrollstühle sind mit einem PU-Schaumstoffsitz ausgestattet, der den meisten Menschen guten Komfort bietet. Für eine bessere Druckentlastung ist ein zusätzliches mit Decutex überzogenes Schaumstoffkissen lieferbar. Alle Nähte sind vollständig verschweißt, so dass es leicht zu reinigen und zu 100% wasserfest ist. Die Kissen sind sowohl für den Sitz mit Hygiene, als auch für den Sitz mit ovalem Ausschnitt lieferbar.

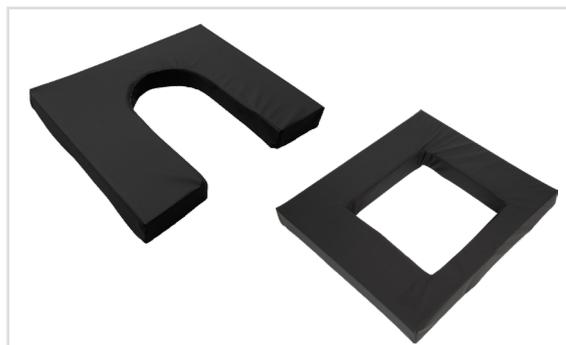

## Sicherheitsbügel

Art.Nr. 302127

Um dem Benutzer zusätzliche Sicherheit zu bieten, kann ein Sicherheitsbügel am Dusch- und Toilettenrollstuhl angebracht werden. Die Adapter für den Sicherheitsbügel werden an den Armlehnen montiert, wonach der Bügel leicht entfernt und wieder angebracht werden kann.



## Amputationsstütze

Art.Nr. 302128 (links) / 302129 (rechts)

Die Amputationsstütze unterstützt den Beinstumpf in der richtigen Position und kann an Stelle der normalen Fußstütze ohne Werkzeug montiert werden. Die Stütze ist mit zwei geformten Polyurethanschalen ausgestattet, die für einen optimalen Halt unabhängig voneinander abgewinkelt werden können.



## Seitenpelotten

Art.Nr. 30212P (small) / 30212Q (large) - linke Seite  
30212R (small) / 30212S (large) - rechte Seite

Die Seitenpelotten aus geformtem Polyurethan werden entweder am hinteren Rohr oder am Sitz montiert und stufenlos an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst.

Die Pelotten sind in zwei Größen erhältlich:

10 x 14 cm (*small*)

14 x 20 cm (*large*)



## 5" Räder mit verlängertem Rohr

Art.Nr. 30212M

Für die Mobilex Dusch- und Toilettenrollstühle sind 5" Räder mit verlängertem Rohr lieferbar. Dadurch kann die Sitzhöhe und die überfahrbare Höhe des Dusch- und Toilettenstuhls um 5 cm erhöht werden.



# KAKADU TILT MIT KANTELUNG

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl Kakadu Tilt kann in der Sitzkantelung individuell von -5° bis +25° eingestellt werden. Die Kopfstütze mit Ohrenaussparung kann in der Höhe, Tiefe und im Winkel verstellt werden und ist im Lieferumfang enthalten.

Die Unterschenkellänge und der Winkel der Fußplatten sind bei den Fußstützen verstellbar. Die komplette schwarze Polsterung, inklusiv der Kopfstütze, besteht aus weichem PUR. Serienmäßig wird der Kakadu Tilt mit vier 5" Rädern mit Feststellbremsen ausgeliefert.

Der Stuhl wird serienmäßig mit Toiletteneimer, Deckel und schwarzer Sitz-Abdeckung geliefert.



## 24" Antriebsräder

Art.Nr. 302023

Der Kakadu Tilt kann mit großen 24" Antriebsrädern ausgestattet werden, damit der Benutzer sich selbst fortbewegen kann.

| Technische Daten  | Tilt<br>302024 | Tilt L<br>302025 | Diff.<br>bei 24" |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Sitzbreite  | 45 cm          | 50 cm            | ---              |
| Sitztiefe   | 43 cm          | 43 cm            | ---              |
| Sitzhöhe  | 55 - 60 cm     | 55 - 60 cm       | ---              |
| Sitz Ausschnitt   | 19 x 26 cm     | 19 x 26 cm       | ---              |
| Überfahrbare Höhe **  | 40 - 45 cm     | 40 - 45 cm       | ---              |
| Überfahrbare Breite   | 35 cm          | 40 cm            | ---              |
| Sitz-/Rückenwinkel  | 90 °/ 12°      |                  |                  |
| Abstand zwischen den Armlehnen  | 46,5 cm        | 51,5 cm          |                  |
| Höhe der Rückenlehne  | 46 cm          |                  |                  |
| Gesamtbreite  | 56 cm          | 61 cm            | + 14 cm          |
| Gesamttiefe   | 110-120 cm     | 110-120 cm       | + 19 cm          |
| Gesamthöhe  | 97-141 cm      | 97-141 cm        | ---              |
| Tragkraft   | 150 Kg         | 150 Kg           | ---              |
| Leergewicht   | 15,10 kg       | 15,70 kg         | + 4,20 kg        |
| Kippwinkel (Tilt)   | -5° bis +25°   | -5° bis +25°     | ---              |
| ** Die Räder mit verlängertem Rohr (Art.Nr. 30212M) ermöglichen eine zusätzliche Bodenfreiheit von +5 cm. |                |                  |                  |